



## オリジナルユニフォーム

スマートスーツの機能を内包した、働く方の環境に適したオリジナルユニフォームをデザイン・製作いたします。



イメージをつくる、イメージを変える  
着る人に自信をもたせ、その心を輝かせる

詳しくはこちらからご確認下さい

スマートスーツ



## お問合せ

株式会社 スマートサポート

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目7番地 愛生館ビル4階  
【TEL】011-206-1462 【FAX】011-206-1463


着用方法  
動画ページ



製造管理番号

# スマートスーツ®

## 取扱説明書

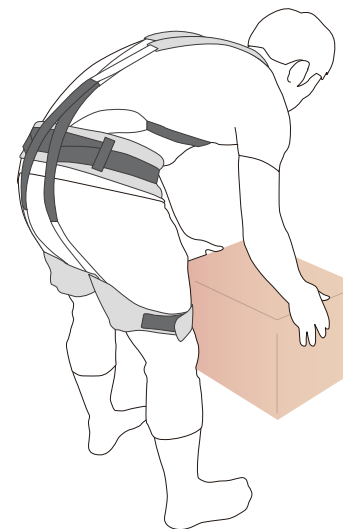

## ⚠ 注意点

- ・本製品は腰の疾病を治療したり、自分が持つ以上の力は発揮する効果はありませんので、過度な重量物を持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることはお避けください。
- ・サポート力の感じ方には個人差があります。
- ・正しい装着をすることで軽労化効果を得ることができます、装着方法に従って装着ください。
- ・使用中になんらかの不具合が発症した場合、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- ・摩擦・損傷がある場合や、面ファスナーの接着力が低下した場合は使用しないでください。




## 免責事項

- ・本製品の特許権および、「スマートスーツ」「軽労化」商標などの知的財産権は(株)スマートサポートに帰属します。
- ・本製品の取り扱い・使用には十分に留意し使用による、いかなる損害や体調不良が生じたとしても(株)スマートサポートは一切の責任を負いません。
- ・試験販売品につき製品の素材や仕様、デザインは販売時期によって異なる場合がありますのでご了承ください。

## 装着方法

1

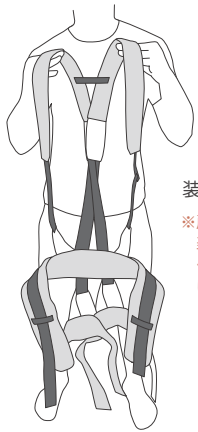

装着前

※肩ベルトの裏面が赤であること、装着前にバックルが緩んでいること、ベルト類がねじれていないことを確認してください


2



肩ベルトをリュックのように背負い胸の上辺りでボタンをとめます

※ボタンは胸囲に合わせて2つ以上とめることをお勧めします

3

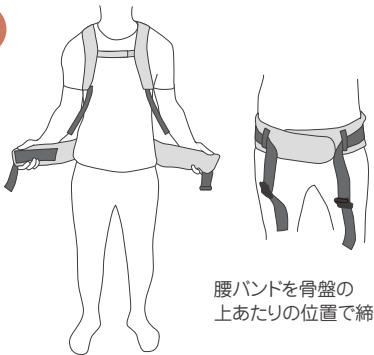

腰バンドを骨盤の上あたりの位置で締めます


4



脚部ベルトを両側の膝上でとめます


※腰ベルトが緩んでいることを確認してから脚部ベルトを下げて、膝上あたりで止めてください

5

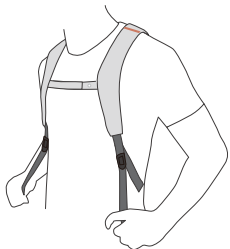

脇ベルトを上半身にフィットするように調整します

6

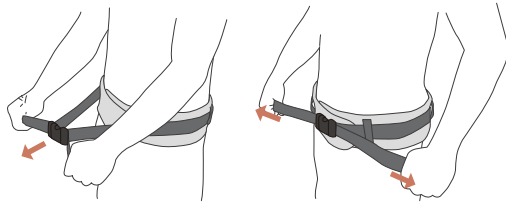

腰ベルトの両端を持ちお腹の前に引き出し、次に横にひっぱりベルトを締めて装着完了です

※余ったベルトは横のベルトループに通してください

手順を守って正しく着用して下さい。  
ベルトを締めすぎると効果が感じられなくなったり、肩こり等を引き起こすこととなりますので、適切な締めつけでご着用ください。


## 効果の確認方法




チェックポイント

☑ 肩の印(ラベル)の位置が肩の上にある

☑ 太ももと腰をつなぐベルトの固定具がくっついていない

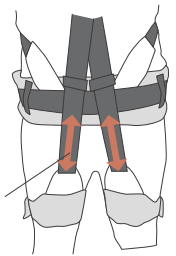

☑ 直立したとき背中のベルトがたるまない程度にベルトを調整

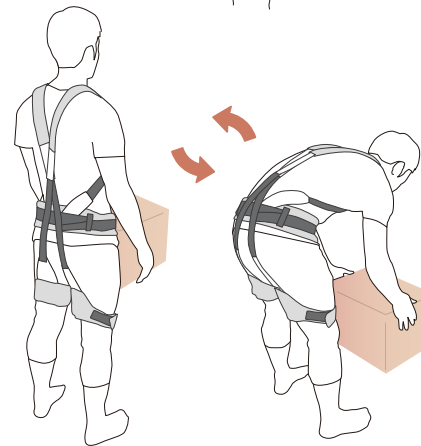

スマートスーツを正しく装着し、床にある荷物を腰で持ち上げる動作を数回繰り返す


バックル・ベルト類を外し、同じ動作で効果を実感

ゴムの張力による上半身の持ち上げ効果とお腹を締めるコルセット効果で腰へかかる負担を軽減されていることがわかるはずですが

※腰痛に注意し、無理のない重さでご確認ください



## 洗濯方法

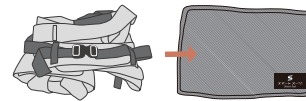

面テープやバックルをとめた状態で、付属のメッシュケースに入れて中性洗剤で洗ってください

※漂白剤・アイロン・ドライクリーニング・乾燥機には対応していません